




¡NUEVO!

¡Siga las indicaciones de montaje con su teléfono inteligente para facilitar el montaje aún más!

800ia Tabla de Inversión

Instrucciones de montaje

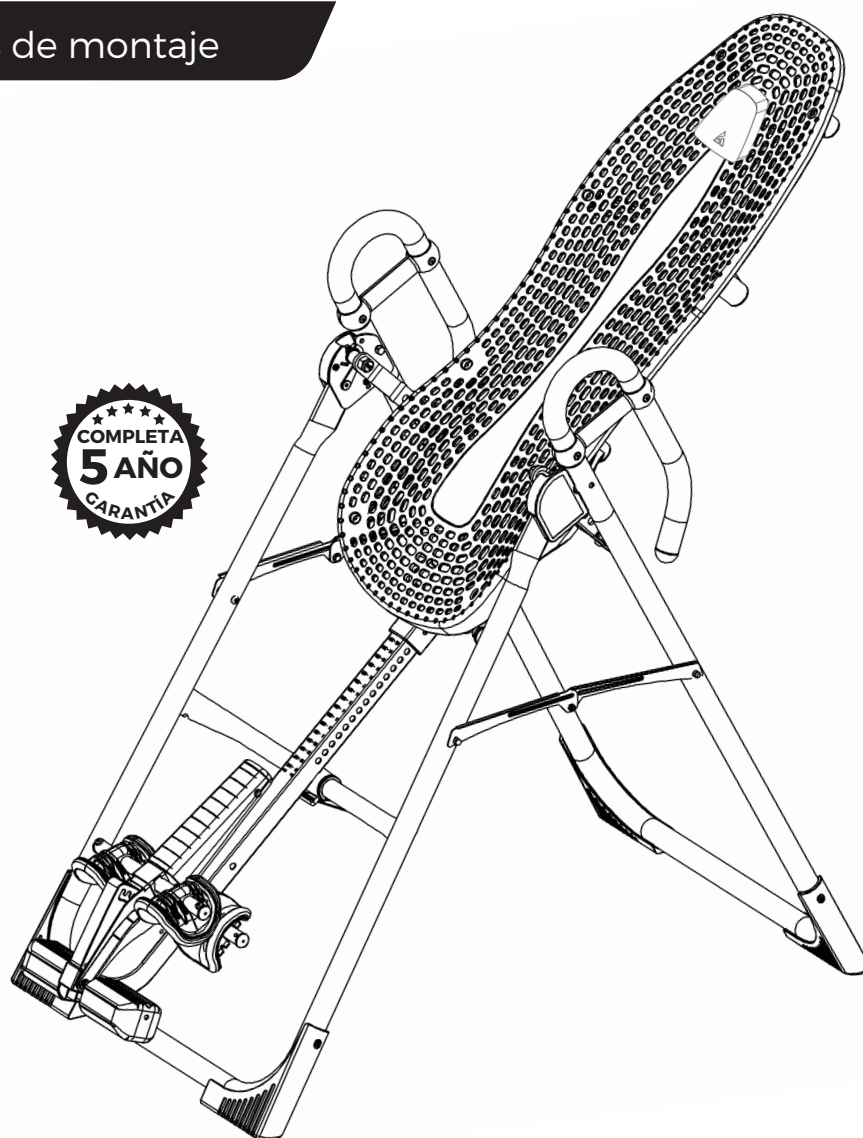

* Las especificaciones pueden variar de esta imagen y están sujetas a cambios sin previo aviso.



Para descargar e imprimir las instrucciones de montaje de 800ia en español, visite teeter.com



¡Felicitaciones por la compra de una Tabla de Inversión 800ia de Teeter! Este producto ha sido cuidadosamente diseñado para proporcionarle un control de rotación de precisión y seguridad para garantizarle la experiencia de inversión más cómoda y eficaz.

A fin de utilizar este producto en toda su plenitud, es fundamental que siga las instrucciones de montaje, lea y entienda completamente el Manual del usuario que se adjunta con el equipo y revise el DVD introductorio antes de usar la nueva Tabla de Inversión Teeter.

- 

Para obtener información sobre el paso a paso e instrucciones interactivas en 3D, descargue BILT (una aplicación móvil GRATUITA) desde su teléfono inteligente para realizar un seguimiento y buscar Teeter 800ia.
- 

Para registrar la garantía de su producto, vaya a teeter.com/Support/Warranty-Registration
- 

Si tiene preguntas con respecto al montaje o si faltan piezas, **NO DEVUELVA EL ARTÍCULO A LA TIENDA NI CONTACTE AL DISTRIBUIDOR.** Nuestros expertos dedicados de servicio de atención al cliente pueden ayudarlo. Contacto servicio al cliente de Teeter al 800.847.0143 o a través de formularios en línea o chat en vivo en teeter.com.

Instrucciones de montaje

Instrucciones importantes de seguridad1

Artículos para el montaje..... 2

Comprensión de la tabla de inversión 3

Etiquetas de advertencias de seguridad y especificaciones de productos 4

Antes de comenzar el montaje..... 5

Pasos para el montaje6 – 11

Control de un mal montaje..... 12

Antes de hacer la inversión 13

Términos de la garantía y registro..... 15

Manual del usuario (adjunto al equipo)

Instrucciones importantes de seguridad1

Configuraciones del usuario 2

Prepárese para invertir 3 – 4

Inversión 4 – 5

Almacenamiento y mantenimiento 5

Cómo aprovechar al máximo su Teeter 6

ANTES DE COMENZAR: Revise todos los pasos antes de comenzar el montaje y lea todas las medidas de seguridad antes de utilizar la tabla de inversión. Siga con cuidado las instrucciones de montaje y respete el Manual del Usuario para garantizar la seguridad y la integridad del producto.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR LA TABLA DE INVERSIÓN

⚠ ADVERTENCIA

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS PODRÍA OCASIONAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE

Para reducir el riesgo de lesiones:

- Lea y comprenda todas las instrucciones, revise todos los documentos adjuntos e inspeccione el equipo antes de usar la tabla de inversión. Es su responsabilidad familiarizarse con el uso adecuado de este equipo y los riesgos inherentes de la inversión, como caer sobre su cabeza o cuello, pellizcarse, quedar atrapado o fallas en el equipo o agrava una afección médica preexistente. Es responsabilidad del propietario asegurarse de que todos los usuarios del producto reciban información completa sobre el uso adecuado del equipo y de todas las precauciones de seguridad.

- **NO utilice el equipo sin la aprobación de un médico certificado.** Revise cuidadosamente con su médico la siguiente lista de contraindicaciones médicas para la inversión (Esta no es una lista exhaustiva; su propósito es sólo de referencia):

- | | | | |
|--|---|--|---|
| • Infección del oído medio | • Trastornos cardíacos o circulatorios | • Lesión cerebral o trauma craneal reciente | • Debilidad ósea (osteoporosis) |
| • Obesidad extrema | • Uso de anticoagulantes (incluyendo dosis altas de aspirina) | • Accidente cerebro-vascular o accidente isquémico transitorio reciente | • Fracturas recientes o que no han sanado |
| • Embarazo | • Debilidad, fragilidad o problemas de movilidad | • Blessure de la colonne vertébrale o afecciones que tienen un impacto en la médula espinal. | • Clavos de fijación medular o soportes ortopédicos implantados quirúrgicamente |
| • Hernia ventral o hiatal | • Mareos, dificultad con la coordinación o desorientación con la cabeza hacia abajo | • Esclerosis cerebral | • Cualquier otra afección médica que pueda verse agravada por un aumento en la presión arterial, presión intracraneal o el estrés mecánico de la posición invertida |
| • Enfermedades de los ojos como glaucoma, desprendimiento de la retina o conjuntivitis | • Vértigo, mareo provocado por el movimiento o trastornos del oído interno | • Afecciones médicas asociadas con las articulaciones que soportan el peso. | |
| • Sinusitis crónica | | • Inflamación articular aguda | |
| • Presión sanguínea alta o hipertensión | | | |

- **SIEMPRE** asegúrese de que el Mecanismo de seguridad para tobillos esté debidamente ajustado y acoplado, y que sus tobillos estén asegurados antes de usar el equipo. ESCUCHE, SIENTA, VEA y PRUEBE que el mecanismo de seguridad para tobillos esté cómodo, ajustado y seguro CADA VEZ que use el equipo.
- **SIEMPRE** utilice calzado con los cordones bien ajustados y que tenga suela plana, como el calzado deportivo normal.
- **NO** use calzado que pueda interferir con el Mecanismo de seguridad para tobillos, como zapatos con suelas gruesas, botas, calzado alto ni ningún tipo de zapato que supere la altura del hueso del tobillo.
- **NO** use la tabla de inversión hasta que esté correctamente ajustada para su altura y peso corporal. El ajuste inadecuado puede causar una inversión rápida o hacer que el regreso a la posición vertical sea difícil. Los nuevos usuarios y quienes presenten impedimentos físicos o mentales requerirán la ayuda de otra persona. Asegúrese de que el equipo esté configurado para su configuración de usuario única antes de cada uso.
- **NO** se siente ni levante la cabeza para regresar a la posición vertical. En lugar doble las rodillas y deslice el cuerpo hacia el extremo de los pies de la tabla de inversión para cambiar la distribución del peso. Si se bloquea en inversión completa, siga las instrucciones para liberarlo de la posición bloqueada antes de regresarlo a la posición vertical.
- **NO** continúe usando el equipo si siente dolor o si siente mareo o vértigo al estar invertido. Regrese de inmediato a la posición vertical para recuperarse y eventualmente bajarse.
- **NO** utilice la tabla si mide más de 6 pies y 6 pulgadas (198 cm) o pesa más de 300 lbs. (136 kg). Podría producirse un fallo estructural o la cabeza/cuello podría impactar contra el suelo durante la inversión.
- **NO** permita que los niños utilicen esta máquina. Mantenga a los niños, espectadores y mascotas lejos de la máquina mientras se encuentre en uso. Esta tabla de inversión no está diseñada para personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que les falta experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión e instrucción con respecto al uso de la máquina de parte de una persona responsable de su seguridad.
- **NO** guarde la tabla de inversión en posición vertical si hay niños presentes. Doble y recueste la tabla en el piso. **NO** la guarde en áreas al aire libre.
- **NO** realice movimientos agresivos ni utilice pesas, bandas elásticas ni ningún otro dispositivo de estiramiento o de ejercicio, ni accesorios que no sean de la marca Teeter® mientras se encuentre en la tabla de inversión. Utilice esta tabla de inversión solo para los fines descritos en este manual.
- **NO** deje caer ni introduzca ningún objeto en los orificios. Mantenga el cuerpo, el cabello, la ropa suelta y las joyas lejos de las piezas móviles.
- **NO** lo utilice en ningún entorno comercial, de alquiler o institucional. Este producto está diseñado sólo para el uso doméstico.
- **NO** use el equipo mientras esté bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos que puedan causar somnolencia o desorientación.
- **SIEMPRE** revise el equipo antes de usarlo. Revise que todos los sujetadores estén seguros.
- **SIEMPRE** reemplace las piezas defectuosas de inmediato y/o no utilice el equipo hasta que se repare.
- **SIEMPRE** coloque el equipo sobre una superficie plana y lejos del agua o cornisas que puedan provocar inmersiones o caídas accidentales.
- Consulte los avisos de advertencia adicionales colocados en el equipo. Si la etiqueta del producto o el manual del usuario se pierde, dañan o no se puede leer, póngase en contacto con Servicio al cliente para reemplazarlo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Artículos para el montaje


Los elementos no se muestran a escala. Los dibujos de tornillería están ubicados en el inserto dentro de cada kit de tornillería.

N.º DE ARTÍCULO	NOMBRE DE ARTÍCULO
Montaje de la base de la estructura en A	
NX2200	Estructura en A
F51007	Correa de sujeción previamente montada a la estructura en A
Montaje de las empuñaduras	
FS2045	Empuñaduras de apoyo con tracción Traction Support™ (2)
FS2025	Cubiertas de bisagra (2)
HK1009	Kit de tornillería para montaje de empuñaduras
HK1002	Kit de tornillería para la cubiertas de bisagra
Montaje de la bisagra deslizante	
F51064	Bisagras deslizantes de tres orificios (2)
Montaje del respaldo	
EP2300	Respaldo
HK1010	Kit de tornillería para el montaje del respaldo

N.º DE ARTÍCULO	NOMBRE DE ARTÍCULO
Montaje de eje principal	
NX1690	con mecanismo de seguridad para tobillos EZ-Reach™
Accesorios opcionales	
IA8105	Almohada para la cabeza
Herramientas suministradas para el montaje	
IA1149	Llave Allen de 5mm (1)
EP1128A	Llave Allen de 6mm (1)
F51088	Llaves de boca abierta (2)
Soporte del producto	
LI8003	DVD introductorio
LI8000	Manual de Usuario es previamente montada a la estructura en A


Montaje de la base de la estructura en A

con correa de sujeción previamente armada

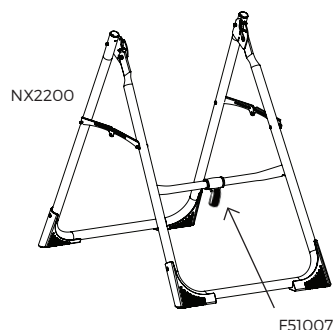


Montaje de las empuñaduras

Use con el Kit de tornillería para montaje de empuñaduras (HK1009) y el Kit de tornillería para la cubiertas de bisagra (HK1002)

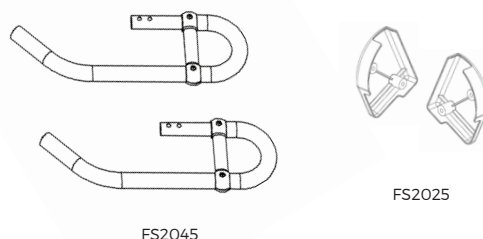

Accesorios opcionales

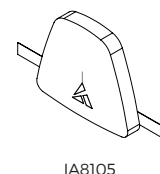


Montaje del respaldo

Use con el Kit de tornillería para el montaje del respaldo (HK1010)




Montaje de eje principal


con mecanismo de seguridad para tobillos EZ-Reach™

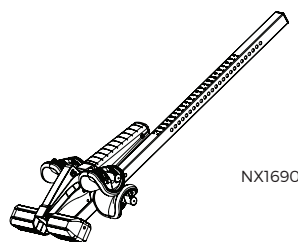

Herramientas suministradas para el montaje

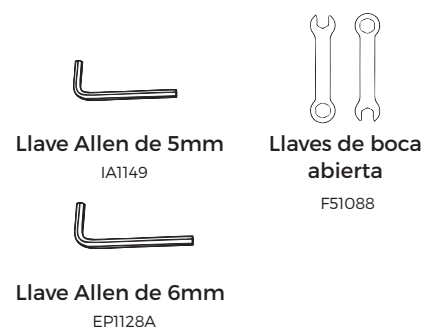


Soporte del producto

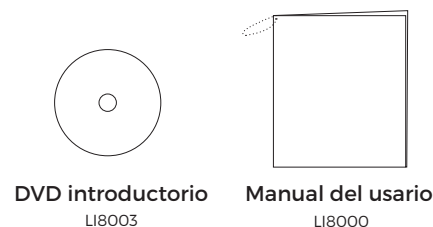

Comprensión de la tabla de inversión

Antes de continuar con la lectura, estudie el siguiente dibujo para familiarizarse con los componentes importantes de su nueva tabla de inversión de Teeter.

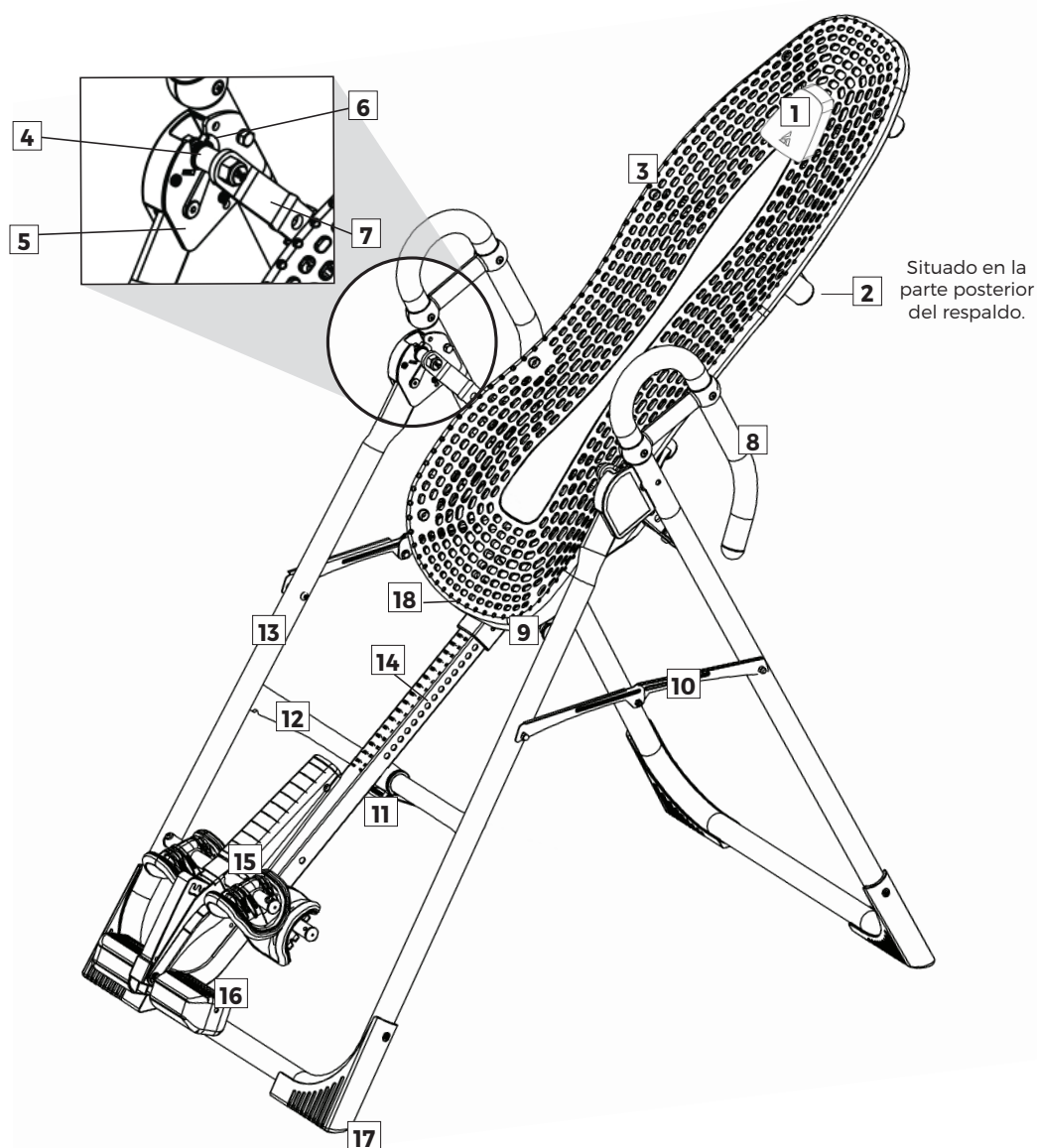

Identificación de las partes y componentes

1	Almohada para la cabeza	7	Bisagras deslizantes de tres orificios	13	Estructura en A
2	Brazos de apoyo	8	Empuñaduras de apoyo con tracción Traction Support™	14	Eje principal
3	Respaldo	9	Pasador de seguridad del regulador de altura	15	Mecanismo de seguridad para tobillos
4	Pasadores de pivote	10	Brazos extensibles	16	Ankle Comfort Dial™
5	Placas de bisagra	11	Correa de sujeción	17	Patas estabilizadoras antideslizantes
6	Ganchos de autobloqueo	12	Barra cruzada	18	Perilla de sujeción

Etiquetas de advertencias de seguridad y especificaciones de productos

Importante: Revise todas las etiquetas y los materiales de apoyo antes de utilizar la tabla de inversión.

⚠ WARNING/ADVERTENCIA

Do not use Seating A for users over 220 lbs (100 kg).
Replace label if damaged, illegible, or removed.
No use la Configuración A para usuarios que superan las 220 lb.
(100 kg). Reemplace las etiquetas en caso de que estén
dañadas, que no se puedan leer o que las hayan quitado.

⚠ ADVERTENCIA


SI NO SE TOMAN PRECAUCIONES, PUEDEN PRODUCIRSE LESIONES GRAVES O LA MUERTE. Para reducir este riesgo:
• LEA y entienda las instrucciones en el Manual del usuario y en el equipo antes de intentar usarlo.
• SIEMPRE ajuste correctamente la altura del eje principal. Si está demasiado corto, puede provocar una inversión rápida y dificultar la vuelta a la posición vertical.
• PELIGRO DE VUELCO: Para almacenar en posición vertical, deje la estructura en A abierta con amplitud suficiente para que permanezca estable o sujétela a una pared. Si hay niños presentes, almacene en forma plana sobre el piso, no en posición vertical.
• NO permita que los niños utilicen esta máquina. Mantenga a los niños, espectadores y mascotas lejos cuando está en uso.
• Mantenga el cuerpo, el cabello, la ropa suelta y las joyas lejos de las piezas móviles.
• Capacidad de altura/peso: 4 ft 8 in - 6 ft 6 in (142-198 cm); 300 lb (136 kg). Para el consumidor, uso exclusivo doméstico.
Reemplace las etiquetas en caso de que estén dañadas, que no se puedan leer o que las hayan quitado.

⚠ ADVERTENCIA

Para LIBERARSE DEL BLOQUEO DE INVERSIÓN COMPLETA, coloque una mano detrás de la cabeza y tire del respaldo hacia su espalda. Para VOLVER A LA POSICIÓN VERTICAL, coloque los brazos a los lados. Si esto no funciona, NO SE SIENTE. Use las empuñaduras y DOBLE LAS RODILLAS para desplazar el peso corporal al lado de pies del respaldo. Si tiene dificultad para volver a la posición vertical, consulte el Manual del Usuario antes de volver a utilizar.
Reemplace las etiquetas en caso de que estén dañadas, que no se puedan leer o que las hayan quitado.

⚠ WARNING / ADVERTENCIA

Serious injury or death can occur if ankles are not properly secured.
Pueden producirse lesiones graves o la muerte si los tobillos no se fijan correctamente.
Replace label and Owner's Manual if damaged, illegible or removed.
Reemplace las etiquetas y el Manual del usuario en caso de que estén dañadas, que no se puedan leer o que las hayan quitado.

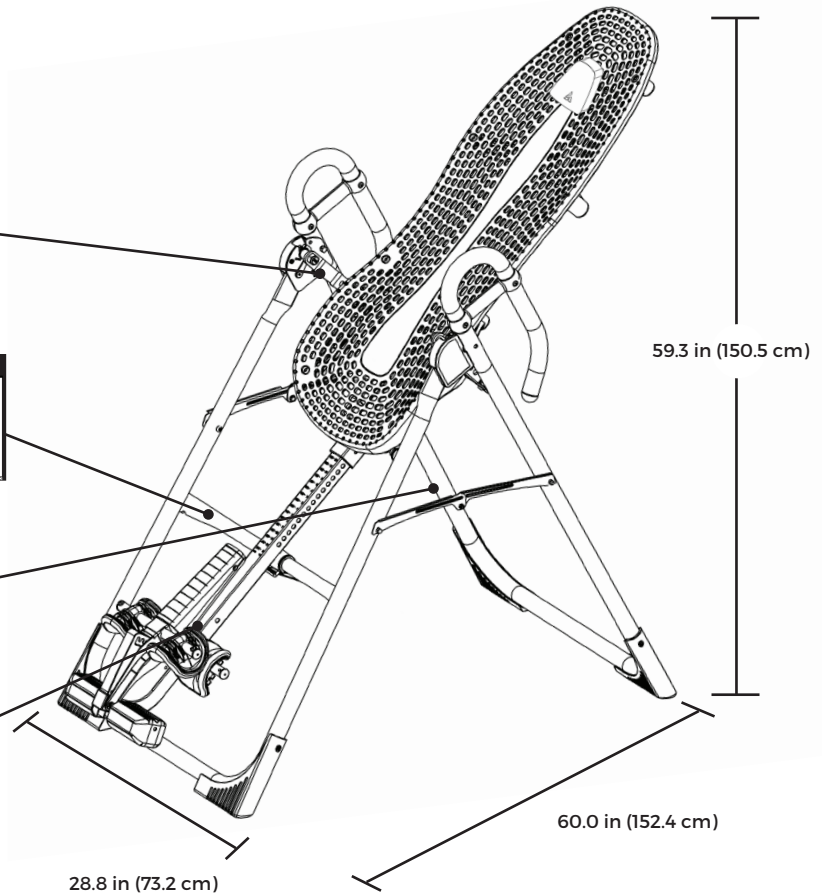

Aquí se muestra la 800ia.
Su modelo real puede variar.

Dimensiones de montaje sin uso: 60.0 in (L) x 28.8 in (W) x 59.3 in (H) (152.4 x 73.2 x 150.5 cm)

Dimensiones máximas en uso: 82.0 in (L) x 28.8 in (W) x 86 in (H) (208.3 x 73.2 x 218.4 cm)

Dimensiones de almacenamiento: 20.0 in (L) x 28.8 in (W) x 66 in (H) (50.8 x 73.2 x 167.6 cm)

Peso (aproximado): 71 lbs. (32.2 kg)

Antes de comenzar el montaje

Desempaque y prepare el espacio de trabajo

- Si es posible, coloque el producto en el lugar o cerca de donde tiene la intención de usarlo para evitar tener que trasladarlo luego.
- Desembale todas las piezas y materiales de apoyo. Separe los materiales de embalaje y despeje la zona de trabajo.
- Busque los kits de tornillería, que vienen con los manuales. Están etiquetadas para corresponder con el proceso de montaje.
- El DVD introductorio proporciona instrucciones paso a paso sobre cómo instalar el producto. Es posible que le resulte útil utilizar el DVD como guía mientras lo ve en su televisor o en una computadora. El DVD se divide en las siguientes secciones:
 - **Montaje** - Siga paso a paso las instrucciones sobre cómo montar su tabla de inversión.
 - **Configuraciones del usuario** - Personalice su experiencia de inversión mediante el ajuste de estos cuatro ajustes personalizables.
 - **Instrucciones de uso** - Aprenda a probar su control de equilibrio y rotación, y cómo invertirse adecuadamente y volver a la posición vertical.
 - **Estiramiento y ejercicios avanzados** - ¡Use su Teeter para estiramientos de rotación, abdominales, sentadillas y mucho más!
 - **Rutinas ADICIONALES para una espalda sana***
El doctor Shawn lo guía a través de 5 originales "Rutinas para una espalda sana", incluida una diseñada específicamente para usar con su tabla de inversión. *No disponible en francés o en español.

Haciendo Asamblea aún más fácil con BILT.



Para el paso a paso, las instrucciones interactivas en 3D, descarga BILT (una aplicación móvil GRATIS) a su teléfono inteligente a seguir a lo largo. Basta con descargar la aplicación BILT escaneando el código QR a continuación y luego buscar 800ia Teeter dentro de la aplicación BILT para empezar!



App Store




Google play




PASO ①

Monte la base de la estructura en A y las empuñaduras de apoyo con tracción

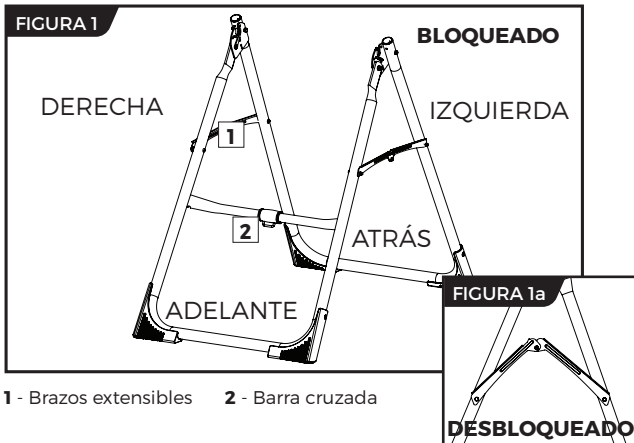


- Sobre una superficie nivelada, coloque la estructura en A de modo que quede en posición vertical y que las patas estabilizadoras se apoyen firmemente en el suelo.
- Presione suavemente los brazos extensibles hacia abajo para asegurarse de que estén completamente abiertos en la posición de bloqueo (Figura 1).
- Busque etiquetas de montaje circular temporarias en la estructura en A. **DERECHA**, **IZQUIERDA**, **ADELANTE**, y **ATRÁS** indican su posición mientras usa el equipo, no frente a él. Estas etiquetas se pueden quitar fácilmente al completar el montaje.

Monte las empuñaduras de apoyo con tracción

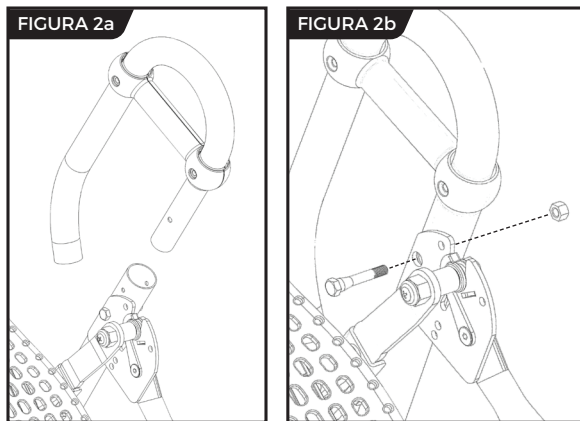

- Ubique el kit de tornillería para montaje de empuñaduras (HK1009).
- Inserte las empuñaduras izquierda y derecha en la estructura en A (Figura 2a).
- Inserte los tornillos hexagonales desde la parte interna de la estructura en A y asegure con las tuercas desde afuera de la estructura en A (Figura 2b).
- Apriete con las llaves provistas.

Instale las cubiertas de bisagra en las placas de bisagra

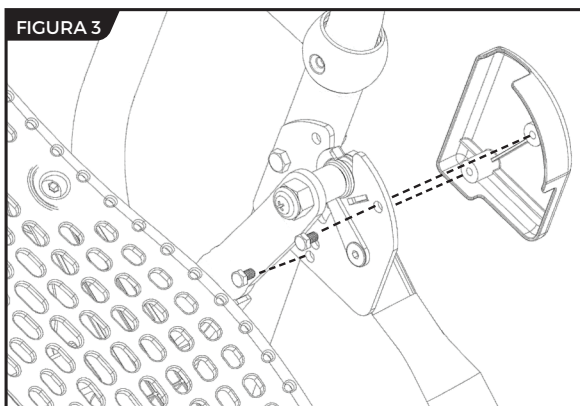


- Localizar el kit de montaje de cubierta de la bisagra (HK1002).
- Seleccione la cubierta de bisagra correspondiente para los lados izquierdo y derecho de la estructura en A al alinear cada uno con la forma de la placa de la bisagra (Figura 3).
- Asegure con (2) tornillo de cabeza Allen para cada lado con una llave de 10/13 mm que se proporciona. Tenga cuidado de no ajustar demasiado.

PASO ②


Montaje de los brazos de apoyo del respaldo

- Ubique el kit de tornillería para el montaje del respaldo (HK1010).
- Coloque el respaldo boca abajo en el suelo y ejerza presión sobre la barra de apoyo de modo tal que los dos orificios se alineen de manera pareja con los de la base de los brazos superiores de apoyo (Figura 4). Puede que tenga que ejercer presión extra para que la barra de apoyo se deslice sobre los separadores de goma.
- Inserte los dos pernos en los orificios abiertos. Sujete cada perno con una arandela y una tuerca (Figura 5).
- Utilice la llave Allen de 6mm suministrada para sujetar los pernos y ajuste las tuercas a los pernos con la llave fija de boca abierta de 10/13 mm.

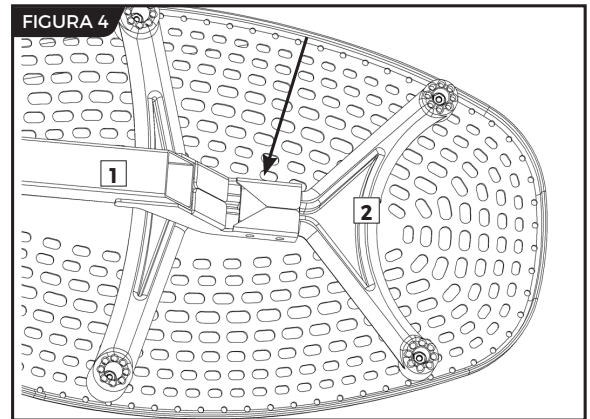

1 - Barra de apoyo

2 - Brazos de apoyo superiores

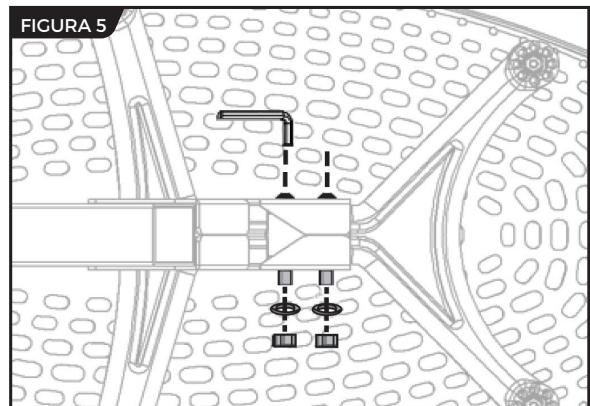

PASO ③

Montaje de las bisagras deslizantes en el respaldo

FIGURA 6

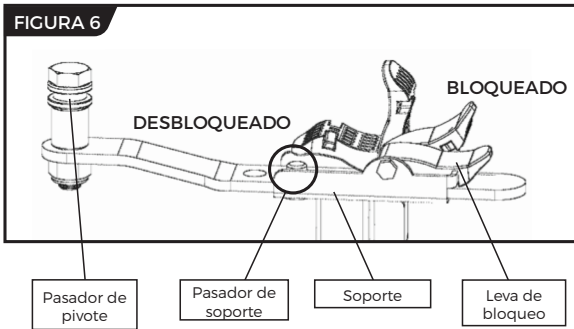


FIGURA 7

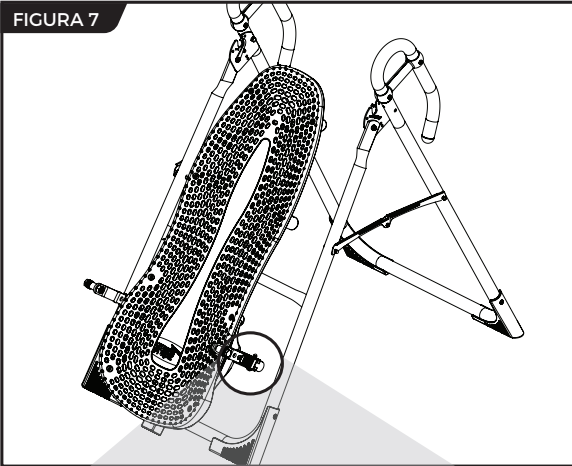


FIGURA 8

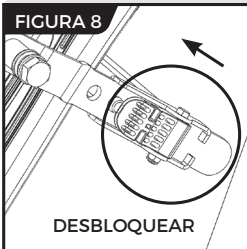


FIGURA 9


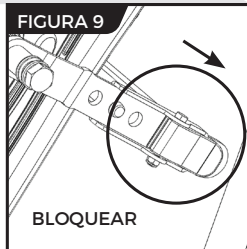


FIGURA 10

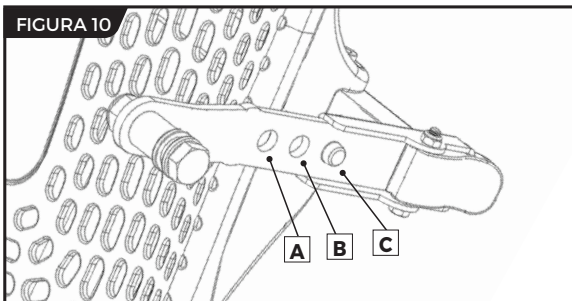

- Familiarícese con los términos de la bisagra deslizante de 3 orificios y la leva de bloqueo (Figura 6).

⚠ ADVERTENCIA

NUNCA desmonte el pasador de pivote de la bisagra deslizante.

- Para facilitar el montaje, apoye el respaldo contra la barra cruzada (Figura 7) en la parte frontal de la estructura en A.
 - A un lado del respaldo, levante la leva de bloqueo y manténgala hacia arriba hasta el final para desbloquear (Figura 8).
 - Con la otra mano, sostenga una bisagra deslizante cerca del pasador de pivote. Con el pasador de pivote hacia afuera, alejado del respaldo, deslice la parte inferior de la bisagra deslizante entre la leva de bloqueo y el soporte.
SUGERENCIA: Asegúrese de que la leva de bloqueo esté totalmente abierta al insertar la bisagra deslizante o de lo contrario el montaje será más difícil.
 - Enganche uno de los orificios en la bisagra deslizante sobre el pasador del soporte. La figura 10 muestra la bisagra deslizante instalada correctamente, con el pasador de soporte trabado en la posición C.
- NOTA:** Consulte la explicación de las posiciones de los orificios en el Manual del usuario. Si no está seguro, comience con la posición C.
- Empuje hacia abajo la leva de bloqueo (Figura 9) para bloquearla y asegurar las bisagras deslizantes.
 - Repita el procedimiento del otro lado. Asegúrese de que las bisagras deslizantes estén colocadas en los orificios a la misma altura en ambos lados.

PASO ④

Montaje del respaldo en la estructura en A







- Colóquese en la parte frontal de la estructura en A, donde se encuentra la barra cruzada (Figura 9).

- Sujete ambas bisagras deslizantes, justo sobre las leva de bloqueo, y levante el respaldo. Deje que la parte superior del respaldo gire hacia el suelo, de modo que la parte posterior del respaldo ahora esté frente a usted y la parte superior del respaldo esté frente a la barra cruzada (Figura 10).

- Baje cada pasador de pivote de las bisagras deslizantes para que entren en las placas de bisagra de la estructura en A, primero en un lado y luego en el otro (Figura 11). Los ganchos de autobloqueo se abrirán para permitir que el pasador de pivote entre en la ranura de la placa de bisagra y después se cerrarán automáticamente sobre el pasador de pivote.

SUGERENCIA: Es posible que necesite ejercer presión hacia afuera de la placa de bisagra para que el segundo pasador de pivote se fije en su lugar.

- Asegúrese de que cada pasador de pivote quede asentado en la base de la ranura en las placas de bisagra y que los ganchos de autobloqueo se hayan cerrado sobre los pasadores de pivote.

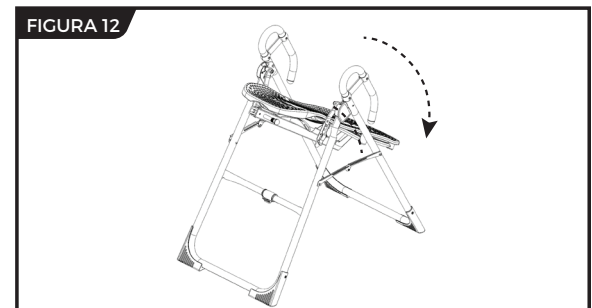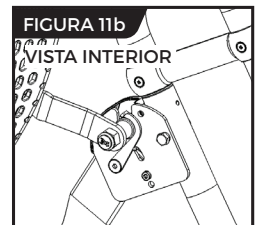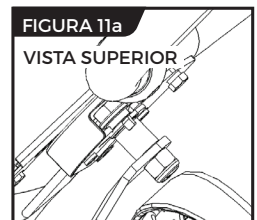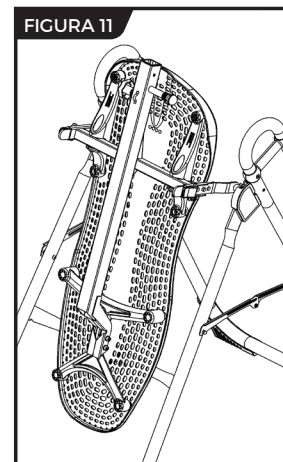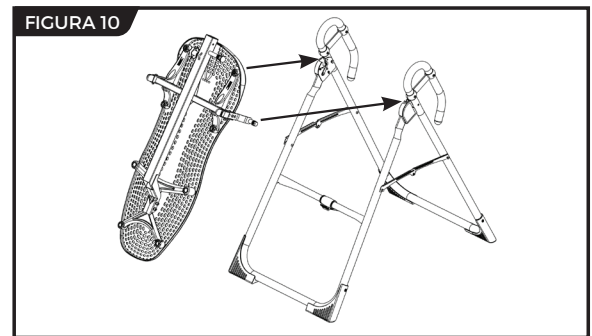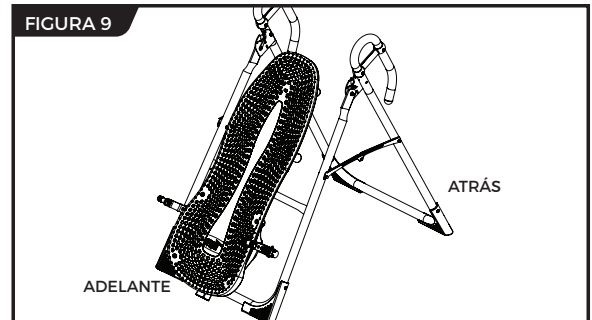

⚠ ADVERTENCIA


Una indicación de que el ensamblaje no se ha realizado correctamente es que los ganchos de autobloqueo no se cierran sobre los pasadores de pivote de las bisagras deslizantes. Si esto no se corrige, podrían causarse lesiones graves e incluso la muerte.

- Gire el respaldo a la posición de uso (Figura 12). Asegúrese de que gire suavemente. Vea también la imagen A en la página 12 para garantizar un montaje correcto.

PASO ⑤

Ensamble el eje principal al respaldo

FIGURA 13

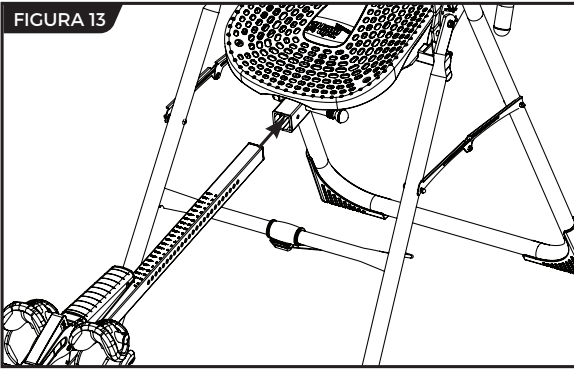


- Afloje la perilla de sujeción que se encuentra en la base del alojamiento del eje principal.

- De frente a la estructura en A, sostenga el eje principal con la mano izquierda con las marcas de altura hacia arriba. Deslice el extremo del eje principal hacia el alojamiento del eje principal (Figura 13) que se encuentra en la base del respaldo.

- Con la mano derecha, tire del pasador de bloqueo del regulador de altura (Figura 14) para que el eje principal pueda deslizarse más adentro y suéltelo a la altura deseada. Consulte el Manual del usuario para obtener más información sobre la selección de la altura.

FIGURA 14

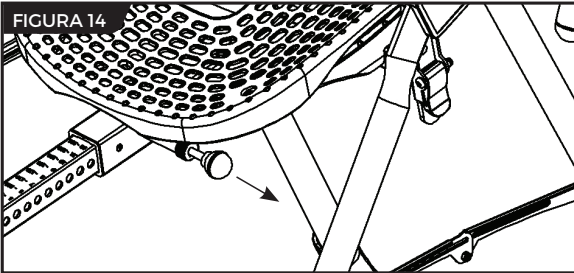


- El eje principal **DEBE ESTAR APOYADO** contra la barra cruzada de la estructura en A (Figura 15).

IMPORTANTE: La barra cruzada evita que el respaldo rote hacia delante cuando el usuario pisa en el cuadrante de comodidad para los tobillos. Si el eje principal no se apoya contra la barra cruzada como se muestra en la figura 15, entonces la tabla se ha montado al revés en la estructura en A.

Esto **DEBE CORREGIRSE** antes de utilizar el producto. Vea también la imagen B en la página 12 para garantizar un montaje correcto.


FIGURA 15

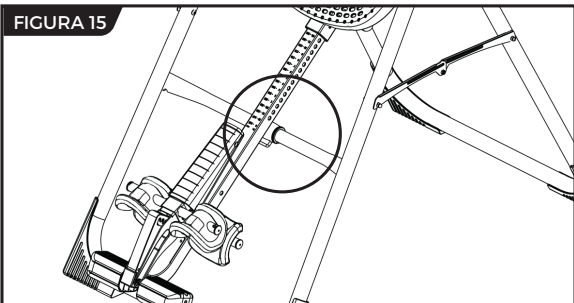

- Vuelva a ajustar la perilla de sujeción.

- Revise a mano la tabla de inversión para verificar que la rotación sea constante y suave (Figura 16) y para asegurarse de que todos los sujetadores estén firmes en su lugar.

FIGURA 16

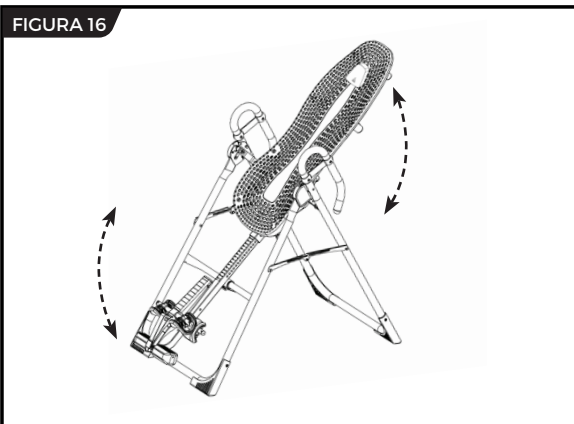


PASO ⑥

Sujete la correa de sujeción y la almohada para la cabeza


Sujete la correa de sujeción

- La correa de sujeción viene montada en la estructura en A.
- Despliegue la correa de sujeción ajustable y sujétela a la barra en U en la parte inferior del respaldo (Figura 20).
- Deslice la hebilla para alargar o acortar la correa de acuerdo con el ángulo de inversión máximo deseado.

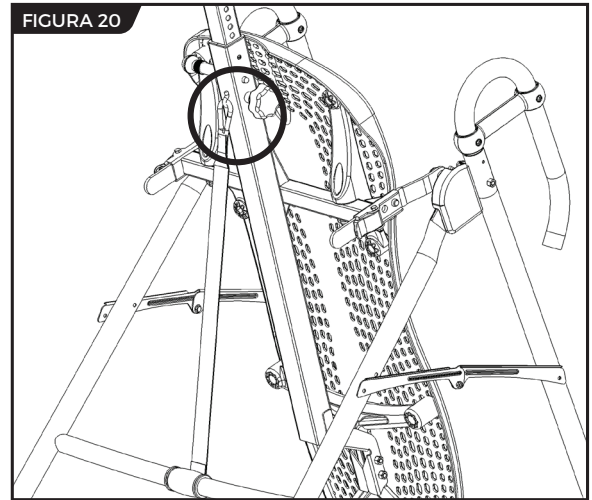

Sujete la almohada para la cabeza

Para sujetar la almohada para la cabeza, sujete las correas de velcro a través de los orificios especificados en el respaldo (Figura 21), lo que permite a la almohada adaptarse con el usuario cuando está en uso. También puede personalizar la posición dependiendo de su preferencia.

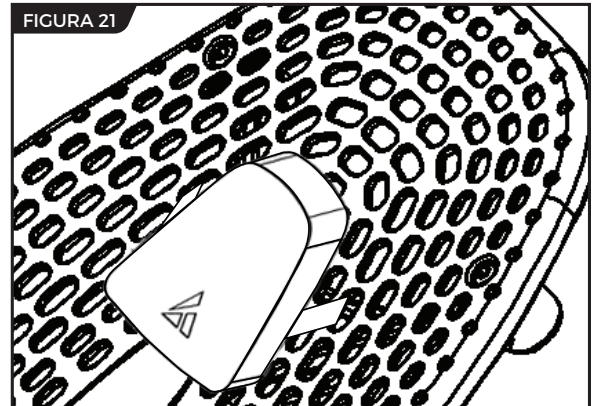

Control de un mal montaje

⚠ ADVERTENCIA

Si su tabla de inversión Teeter se ve como alguna de estas imágenes, ha montado su tabla de inversión de manera incorrecta y no es apta para su uso. ¡Montarla incorrectamente podría provocar lesiones graves o incluso la muerte!

Imagen A

Regrese a las instrucciones del paso 3.

Demuestra que las bisagras deslizantes se han montado al revés en la tabla y debe corregirlas.

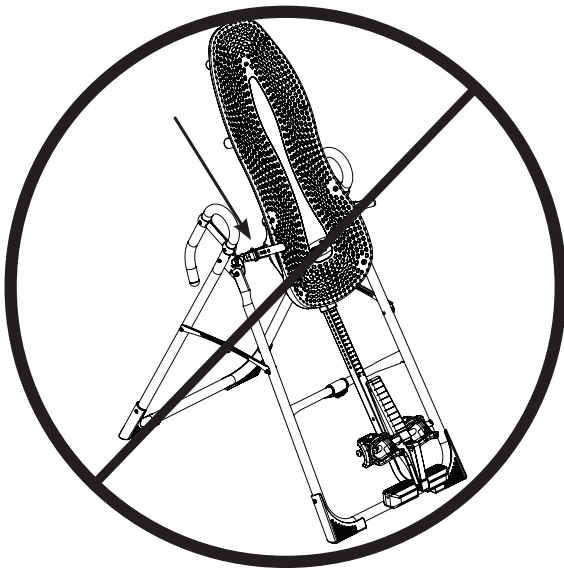


Imagen B

Regrese a las instrucciones del paso 4.

Demuestra que el respaldo se ha montado en la estructura en A al revés de modo que el eje principal no descansa sobre la barra cruzada y debe corregirse.



Antes de hacer la inversión

Asegúrese de que el Manual del usuario se haya adjuntado

El Manual del Usuario contiene información importante respecto de cómo utilizar la tabla de inversión Teeter, incluido cómo personalizar los ajustes del usuario, sujeción y liberación apropiada del mecanismo de seguridad para tobillos, y prueba y ajuste del control de rotación.

- Si no se encuentra adjunto, enhebre la cadena de metal a través del orificio pre-perforado en la esquina superior del Manual del usuario.
- Sujete la cadena a la estructura en A mediante el orificio de la placa de la bisagra destinado a ese fin (Figura 24 y 24a). Deje que el Manual del usuario cuelgue con libertad en el exterior de los brazos extensibles de la estructura en A de manera que no interfiera con la rotación de la tabla.

IMPORTANTE: Una vez sujeto a la estructura en A, **NO** retire el Manual del usuario. Debería estar siempre sujeto a su tabla de inversión como referencia para todos los usuarios tanto para el ajuste apropiado como para el uso del equipo.

! ADVERTENCIA

Lea todo el Manual del usuario antes de utilizar la tabla de inversión Teeter. ¡Una configuración incorrecta podría provocar lesiones graves o incluso la muerte!

Vea el resto del DVD

El DVD introductorio es un suplemento útil del Manual del usuario, con instrucciones fáciles de seguir sobre los ajustes del usuario, cómo invertir, el almacenamiento y mantenimiento e incluso estiramientos y ejercicios que puede hacer con su Teeter.

FIGURA 24


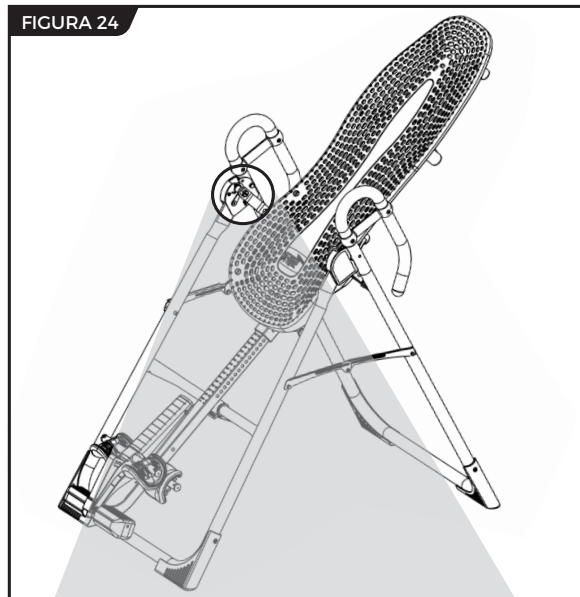


FIGURA 24a



La garantía Teeter establecida a continuación y en el sitio web de Teeter se aplica sólo a los clientes de los EE. UU. y Canadá. Para los clientes internacionales, consulte a su distribuidor local para obtener información sobre la garantía que variará según el país.

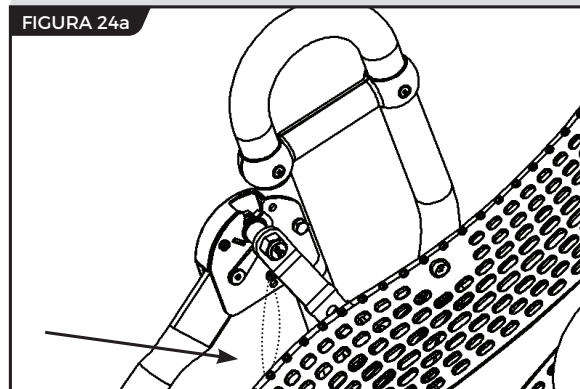

Durante el período que comienza el día de la compra al distribuidor y continúa durante cinco (5) años, Teeter extiende al usuario una garantía de reparación y reemplazo contra los defectos de fabricación de materiales, mano de obra, estructuras y relleno. Teeter reparará o reemplazará los defectos y pagará los costos de todas las partes, la mano de obra y el transporte. Si la reparación o el reemplazo no resultan comercialmente prácticos o no se pueden realizar de manera oportuna, Teeter reemplazará, a discreción del comprador, con un producto comparable o reembolsará el precio de compra.

Los costos de manipulación y transporte relacionados con el servicio de garantía del producto sólo están cubiertos por esta garantía. La presente garantía no abarca los daños que resulten de la manipulación, el montaje o la instalación incorrectos, las reparaciones realizadas por otros, accidente, uso incorrecto o abuso. Bajo ninguna circunstancia Teeter, o cualquier otra parte involucrada en la venta de este producto, tendrá responsabilidad por daños incidentales o consecuentes derivados de la violación de una garantía expresa o implícita sobre ningún producto Teeter.

A EXCEPCIÓN DE LO ESTABLECIDO ANTERIORMENTE, NO SE PROPORCIONA GARANTÍA CON RESPECTO A NINGÚN PRODUCTO TEETER Y SE RECHAZAN TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS. Esta garantía se registrará por las leyes del Estado de Washington, de los EE. UU. En la medida de que esta garantía no se considere ejecutable, se revisará en la medida necesaria para hacerla ejecutable. Esta garantía y cualquier controversia o reclamo que surja de esta garantía o su interpretación se regirán por las leyes del Estado de Washington, de los EE. UU. Cualquier controversia o reclamo que surja o esté relacionada con esta garantía, su interpretación, o de cualquier presunto incumplimiento de la misma, que no pueda resolverse amistosamente entre Teeter y el propietario dentro de los sesenta (60) días de aviso por escrito por la parte agraviada a la otra, deberá resolverse mediante arbitraje sometido a tres (3) árbitros seleccionados de los paneles de los árbitros de la Asociación Estadounidense de Arbitraje ubicada más cerca del lugar principal de negocios de Teeter.

Algunos estados no permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes de una garantía, por lo que la limitación o exclusión anterior puede no aplicarse en su caso. Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior puede no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos que varíen de estado a estado.

CÓMO ENVIAR SU REGISTRO:

Paso 1

Complete esta información para sus propios registros.

Fecha de compra

Producto y modelo

Nombre del distribuidor

N.º de serie

Paso 2

Ingresa a teeter.com para registrar su garantía.

Si no puede ingresar al sitio, puede solicitar el envío de una tarjeta de garantía si llama al Servicio de Atención al Cliente al 800-847-0143.

NO envíe esto a Teeter.



CONSERVE ESTO PARA SUS REGISTROS



Roger Teeter
Fundador e innovador



Si tiene algún problema para ensamblar el equipo o alguna pregunta con respecto al uso, comuníquese con nuestro Servicio de atención al cliente.


USA: 800-847-0143 or info@teeter.com

Internacional: info@teeterintl.com

¡Eche un vistazo a la selección de productos y accesorios disponibles en teeter.com!

USA: Teeter
9902 162nd St. Ct. E.
Puyallup, WA 98375
Número gratuito: 800-847-0143
Fax: 800-847-0188
teeter.com | info@teeter.com

Internacional: Teeter International, Ltd.
Gor-Ray House
758 Great Cambridge Rd
Enfield
Middlesex EN1 3GN
United Kingdom
teeterintl.com | info@teeterintl.com

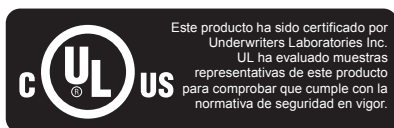

Cualquier modificación a este dispositivo anulará el Listado UL.



Medical Device Safety Service
GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover
Germany
Tel. +49 511 62628630

